

INNO-CE[®]

HA Dermalfüller und Biorevitalisatoren

PRODUKTLINIE

professionelle
Anwendung

CE
1984

Innovation
from
experience



iwo INNOAESTHETICS



Inhalt

PRODUKTLINIE

INNO-CE®

Einführung	4 - 5
Leitfaden für Lösungen	6 - 7
Einfach zu verwenden - Klinische Evidenz	8 - 9

Dermal Filler

MESHA® Essence	11
MESHA® Intense	12
MESHA® Deep	13
MESHA® Smile	14
MESHA® Scars	15

Revitalizer

Moist 1,5	17
Bi-Dens 2.5	18



INNO-CE®

HA Dermalfüller und Biorevitalisatoren

INNO-CE® ist eine neue Generation von CE-zugelassenen Hyaluronsäure-Medizinprodukten, die nur für die professionelle Anwendung bestimmt sind.

Die Linie umfasst 7 Produkte, die vollständig in unserem Labor entwickelt und hergestellt werden: 5 Dermalfüller und 2 stark feuchtigkeitsspendende und revitalisierende Lösungen.

Sie sind in verschiedenen Dichten formuliert und ermöglichen es dem ästhetischen Arzt, auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Patienten mit einfach durchzuführenden, minimal-invasiven Behandlungen einzugehen. Behandlungen, deren Wirksamkeit, Verträglichkeit und nachhaltige Wirkung klinisch erwiesen sind.

Die INNO-CE® Linie vervollständigt das INNOAESTHETICS Produktportfolio, das bereits transdermale Lösungen, chemische Peelings, Dermokosmetika und Nutricosmetics umfasst.



Innovative Biotechnologie zur Umformung von HA-Partikeln

Im Laufe der Jahre hat sich die Injektion von Hyaluronsäure nicht-tierischen Ursprungs als sicher und wirksam erwiesen. Sie sind so beliebt geworden, dass sie die Kollageninjektionen verdrängt haben.

In der Tat bieten nicht-tierische HA eine größere biologische Verträglichkeit und ein minimales Allergierisiko. Darüber hinaus ermöglicht ihr Vernetzungsgrad den Ärzten, je nach dem zu behandelnden Bereich unterschiedliche Wirkungen und eine erhebliche Anpassungsfähigkeit zu erzielen.

Sicher und wirksam

Die Produkte von INNO-CE® werden gemäß GMP und den internationalen Normen ISO 13485 in unserem hochmodernen pharmazeutischen Werk in Barcelona, Spanien, hergestellt.

Alle INNO-CE® sind mit dem CE-Zeichen versehen, was garantiert, dass sie den höchsten europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften entsprechen.

Heutzutage werden HA-basierte Produkte dank neuer Technologien, wie der von INNOAESTHETICS entwickelten, immer weiter verbessert.

Nach jahrelanger Forschung hat das Labor einen Weg gefunden, die traditionelle rhomboide Struktur der HA-Partikel in flache und kugelförmige Partikel umzuformen.

Diese neue Form erleichtert das Eindringen und die Anpassungsfähigkeit von der Substanz und sorgt für genauere, einheitlichere und glattere Ergebnisse.

Hyaluronsäure-Injektionen sind minimalinvasiv und werden im Allgemeinen von allen Patienten sehr gut vertragen.

Außerdem handelt es sich um eine biologisch abbaubare Substanz, deren Wirkung im seltenen Fall von Unzufriedenheit sofort rückgängig gemacht werden kann.

Leitfaden für Lösungen

		PRODUKTE	EIGENSCHAFTEN	INDIKATIONEN
FEINE BIS MITTELSCHWERE FALTEN	DERMALFÜLLER	MESHA[®] essence	Korrigiert feine bis mittlere Mimikfalten und Fältchen.	<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigt feine Linien. • Verwischt kleine Fältchen. • Reduziert moderate Falten.
TIEFE FALTEN		MESHA[®] intense	Füllt tiefe Falten und Runzeln auf. Korrigiert leichten altersbedingten Volumenverlust.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiefe Falten und Furchen im Gesicht. • Subtile Korrekturen des Gesichtsvolumens.
REDEFINITION		MESHA[®] deep	Stellt das mit dem Alter verlorene Gesichtsvolumen wieder her.	<ul style="list-style-type: none"> • Volumenvergrößerung im Gesicht. • Sehr tiefe Falten und Fältchen.
LIPPEN		MESHA[®] smile	Lippenvergrößerung und Korrektur von Lippenfalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Mäßige Volumenvergrößerung der Lippen. • Korrektur von Lippenfalten. • Verbessert die Definition und Textur der Lippen.
NARBEN		MESHA[®] scars	Verbessert und stellt das Volumen wieder her, das durch Narbenbildung verloren gegangen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Korrektur eingedrückter Narben.
INTENSIVE HAUTFEUCHTIGKEIT	REVITALISIERER	MOIST 1.5	Spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit und Bio-Revitalisierung.	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtigkeit für die Haut. • Bio-Revitalisierung der Haut. • Stumpfe Haut. • Feine Linien.
REVITALISER		BI-DENS 2.5	Redensifiziert, revitalisiert Hauterschaffung und befeuchtet die Haut.	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöht die Hautdicke. • Verbessert die Hautelastizität. • Stellt das Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut wieder her. • Reduziert feine Linien.

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Gesichtsverjüngung

Narbenminimierung

MESHA® Scars

Feine Linien und moderate Falten

MESHA® Essence

Intensive Feuchtigkeitsversorgung
und Revitalisierung der Haut

MOIST 1.5

Hautdicke und Revitalisierung

BI-DENS 2.5

Lippenvergrößerung und Definition

MESHA® Smile

Tiefe Falten und Hautfalten

MESHA® Intense

Neudefinition der
Gesichtskonturen

MESHA® Deep

CE
1984

Einfach zu bedienen

Alle INNO-CE® Produkte werden in vorgeladenen Glasspritzen für den einmaligen Gebrauch geliefert. Jede Spritze wird mit zwei sterilen Einwegnadeln und zwei Etiketten für die Patientenakte geliefert, um die Rückverfolgbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

Die vorgeladenen Spritzen sind sicher und bequem, gewährleisten eine präzisere Dosierung und sind für den Arzt einfacher zu handhaben.



Die Nadel

- Standard-Facettenschliff-Nadel.
- Länge: ½ Zoll.
- 30 Gauge.
- Gauge 27 für MESHA® Deep.

Die Spritze

- Sterilisierte und vorgespannte Glasspritze.
- 1,2 ml für Füllstoffe.
- 3 ml für Moist und Bi-Dens.
- Skalenmarkierungen für eine genaue visuelle Kontrolle des Spritzeninhalts.
- Ergonomische Flansche und Stößel für maximalen Komfort und Präzision.

Klinischer Nachweis

Ergebnisse einer offenen, multizentrischen klinischen Studie, die an 61 Patienten durchgeführt wurde, um die Sicherheit und Wirksamkeit von **INNO-CE®** Line zu bewerten.




Die Freiwilligen erreichten eine deutliche Verbesserung auf der GAIS-Skala.



Die Freiwilligen gaben an, sehr zufrieden oder zufrieden zu sein, und erklärten, die Behandlung habe ihre Erwartungen erfüllt.



Die Forscher sind mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden oder zufrieden.

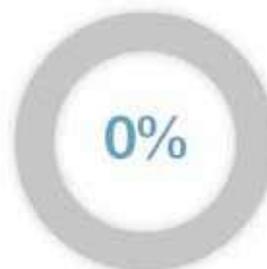

Es wurden keine unerwünschten Wirkungen gemeldet.

Vorteile

- Reine und höchste HA-Qualität in optimaler Konzentration.
- Biokompatibel: Ausgezeichnete Hautverträglichkeit und minimale oder keine unerwünschten Wirkungen.
- Biologisch abbaubar: 100% reversibel.
- Perfekte Integration und homogener Vertrieb der Produkte.
- Optimierte Texturen, die sich perfekt an die Dynamik des Gesichts anpassen.
- Progressive und kumulative Verbesserung des Hautgewebes.
- Sichtbare Ergebnisse bereits nach der ersten Sitzung.
- Präzise, glatte und natürliche Ergebnisse.
- Die Dauer der Wirkung ist von Person zu unterschiedlich, sie hält jedoch mindestens 3 bis 6 Monate an.



Anti-Aging



Revitalisierung



Volumen und Neudefinition des Gesichts



Feine Linien und moderate Falten



Mositurizing



Definition der Lippen



Tiefe Falten und Hautfalten



Straffung



Minimierung von Narben



Rheologische Eigenschaften

Um ein optimales und sicheres Ergebnis zu erzielen, lesen Sie bitte vor der Anwendung die Anweisungen und Produktbeschreibungen von **INNO-CE®** sorgfältig durch.

MESHA®

Korrektur
Definition
Volumen

Hochwertige, nicht-tierische, vernetzte HA-Filler, die in verschiedenen Dichten formuliert sind, um spezifische Probleme in verschiedenen Gesichtsbereichen zu behandeln. Die resorbierbaren und vielseitigen INNO-CE® Filler bieten sichtbare und natürliche Ergebnisse.

CE
1984

INNO-CE®

MESHA®

essence

HA

20mg/ml

Wirkt feinen Linien und mäßige Fältchen entgegen und sorgt für ein natürliches Aussehen.



INDIKATIONEN



Inhaltsstoffe


Wasser, vernetztes Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dehydrat.

Indikationen

- Korrektur von feinen bis mäßigen Mimikfalten und Fältchen.

Behandlungsprotokoll

Führen Sie 1 Sitzung alle 3-6 Monate durch.

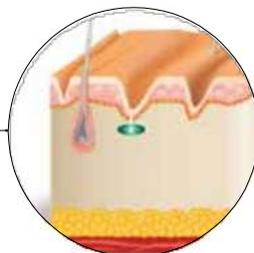

Injektionstiefe

 Vernetzter Wirkstoff
BDDE (< 1µg/ml)

 Partikelgröße
300-500 µm

 Rheologische Eigenschaften
G' = 514 Pa
G'' = 106 Pa (bei 0,7Hz)

 des Erzeugnisses CE 1984
7.0 - 7.5

 Spritze CE 0197
1,2 ml

 Nadel
30 G

 Endotoxine
< 0,5 EU/ml

INNO-CE®

MESHA®

intense

HA

20mg/ml

Füllt wirkungsvoll tiefe Falten und Gesichtsfalten auf. Subtile Korrekturen des Volumenverlustes.



INDIKATIONEN



Inhaltsstoffe

Wasser, vernetztes Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dehydrat.


Indikationen

- Tiefe Falten und Furchen im Gesicht.
- Subtile Korrekturen des Gesichtsvolumens.

Behandlungsprotokoll

Führen Sie 1 Sitzung alle 3-6 Monate durch.

Injektionstiefe

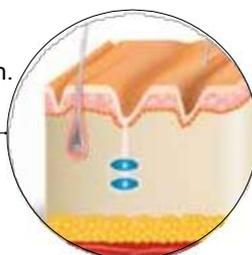

 **Vernetzter Wirkstoff**
BDDE (< 1µg/ml)

 **Partikelgröße**
500-950 µm

 **Rheologische Eigenschaften**
G' = 903 Pa
G'' = 108 Pa (bei 0,7Hz)

 **pH** des Erzeugnisses C E 1984
7.0 - 7.5

 **Spritze** C E 0197
1,2 ml

 **Nadel**
30 G

 **Endotoxine**
< 0,5 EU/ml

INNO-CE®

MESHA®

deep

HA

20mg/ml

Modellierbares HA-Gel zur Wiederherstellung und Neuformung des Gesichtsvolumens.



INDIKATIONEN



Inhaltsstoffe

Wasser, vernetztes Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat Dehydrieren.


Indikationen

- Volumenvergrößerung im Gesicht.
- Sehr tiefe Falten und Fältchen.

Behandlungsprotokoll

Führen Sie 1 Sitzung alle 3-6 Monate durch.

Injektionstiefe

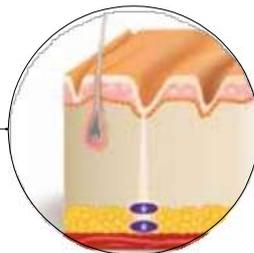

 Vernetzter Wirkstoff
BDDE (< 1 µg/ml)

 Partikelgröße
200-500 µm

 Rheologische Eigenschaften
G' = 275 Pa
G'' = 31 Pa (bei 0,7Hz)

 des Erzeugnisses CE 1984
6.0 - 7.5

 Spritze CE 0197

1,2 ml

 Nadel
27 G

 Endotoxine
< 0,5 EU/ml

INNO-CE®

MESHA®

smile

HA

20mg/ml

Vergrößert das Volumen der Lippen, verbessert ihre Textur und Definition und füllt Lippenfältchen auf. Natürlich aussehende Ergebnisse



INDIKATIONEN



Zutaten

Wasser, vernetztes Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dehydrat.


Indikationen

- Mäßige Vergrößerung des Lippenvolumens.
- Korrektur von Lippenfalten.

Behandlungsprotokoll

Führen Sie 1 Sitzung alle 3-6 Monate durch.

Injektionstiefe

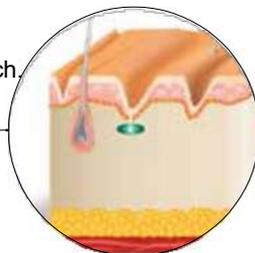

Vernetzter Wirkstoff
BDDE (< 1µg/ml)



Partikelgröße
300-500 µm



Rheologische Eigenschaften
G' = 534 Pa
G'' = 100 Pa (bei 0,7Hz)



pH des Erzeugnisses \llcorner 1984
6.0 - 7.5



Spritze \llcorner 0197
1,2 ml



Nadel
30 G



Endotoxine
< 0,5 EU/ml

INNO-CE®

MESHA®**scars****HA**

20mg/ml

Spezifischer Filler zur Korrektur von vertieften Narben. Glättet und glättet der Hautoberfläche.



INDIKATIONEN

**Inhaltsstoffe**


Wasser, vernetztes Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dehydrat.

Indikationen

- Depressive Narben.

Behandlungsprotokoll

Führen Sie 1 Sitzung alle 3-6 Monate durch.

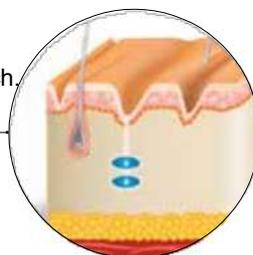Injektionstiefe

Vernetzter Wirkstoff
BDDE (< 1µg/ml)



Partikelgröße
300-500 µm



Rheologische Eigenschaften
G' = 274 Pa
G'' = 100 Pa (bei 0,7Hz)



des Erzeugnisses CE 1984
6,0 - 7,5



Spritze CE 0197
1,2 ml



Nadel
30 G



Endotoxine
< 0,5 EU/ml



FEUCHTIGKEITSBINDEND

Revitalisierung
feuchtigkeitsspendend

Nicht vernetzte Hyaluronsäure nicht-tierischen Ursprungs, die die Haut tiefgehend mit Feuchtigkeit versorgt und revitalisiert.

Diese Produkte verbessern sichtbar die Hautqualität und sorgen sofort für ein natürliches Strahlen.


INNO-CE®

MOIST

1.5**HA**

15mg/ml

HA mit hohem Molekulargewicht, das intensiv Feuchtigkeit spendet und den physiologischen Zustand der Haut wiederherstellt.
die Haut und lässt sie strahlen.

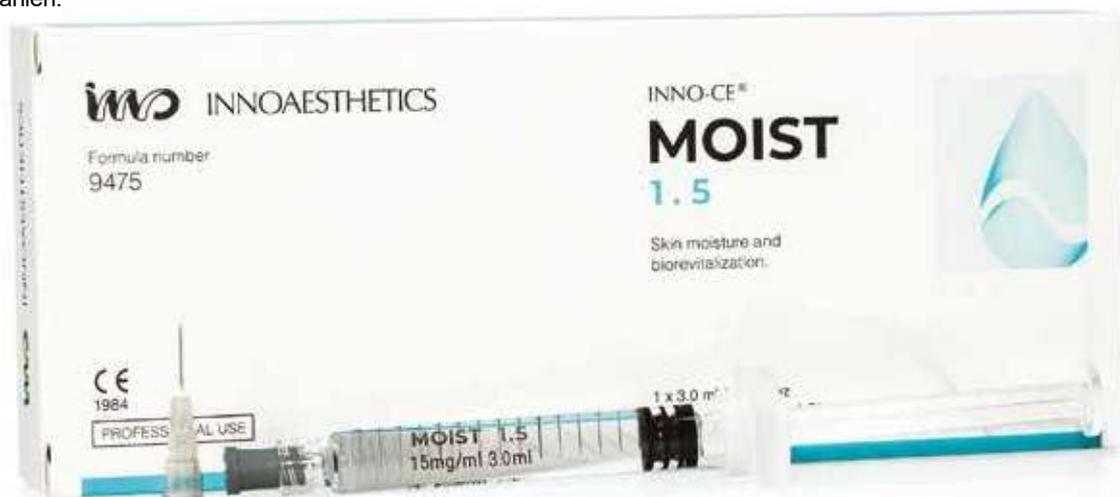**INDIKATIONEN****Inhaltsstoffe**


Wasser, Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Dehydrat, Kalium, Dihydrogenphosphat.

Indikationen

- Feuchtigkeit für die Haut.
- Bio-Revitalisierung der Haut.
- Turgor und Leuchtkraft der Haut.
- Feine Linien.

Behandlungsprotokoll

Ein Zyklus von 3 Behandlungssitzungen im Abstand von 30 Tagen ein- oder zweimal pro Jahr.

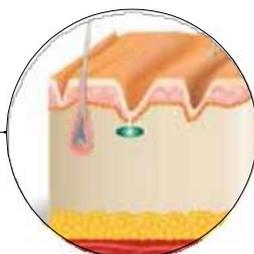Injektionstiefe

Vernetzter Wirkstoff

Keine



Molekulargewicht

2,3 MDa



des Erzeugnisses

7.0 - 7.5



Spritze

3 ml

CE 1984



Nadel

30 G

CE 0197



Endotoxine

< 0,5 EU/ml

INNO-CE®


BI-DENS

2.5

HA

25mg/ml

Kombination aus HA mit hohem und sehr hohem Molekulargewicht, um die Hautdicke zu erhöhen und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Es strafft, verjüngt und revitalisiert die Haut sichtbar.

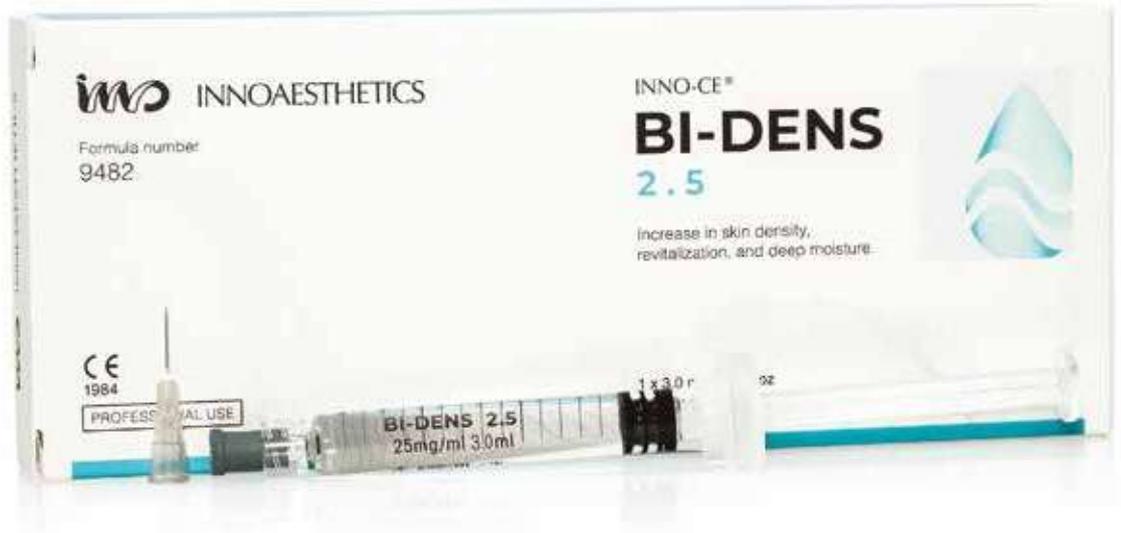

INDIKATIONEN

Inhaltsstoffe

Wasser, Natriumhyaluronat (HA), Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Dehydrat, Kalium, Dihydrogenphosphat.


Indikationen

- Erhöht die Hautdicke.
- Hauterschlaffung.
- Hydratisierung der Haut.
- Feine Linien.

Behandlungsprotokoll

Ein Zyklus von 3 Behandlungssitzungen im Abstand von 30 Tagen ein- oder zweimal pro Jahr.

Injektionstiefe

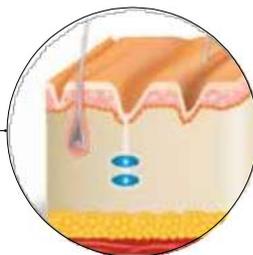

Vernetzter Wirkstoff
Keine

Molekulargewicht
1,8 MDa und 4MDa

pH
des Erzeugnisses
7.0 - 7.5

Spritze
3 ml
C € 1984

Nadel
30 G
C € 0197

Endotoxine
< 0,5 EU/ml

Exklusivvertrieb Deutschland:



MenkeMED GmbH
Tucherpark 22
85622 Feldkirchen

W: www.menke-med.de
M: info@menke-med.de
TEL.: 089.2020446.0

Angaben zum Hersteller:

 **INNOAESTHETICS**

LABORATORIO INNOAESTHETICS, S.L.U. | www.innoaesthetics.com | T: +34 93 470 59 45

